

	GI Dental Implants CAD/CAM Bibliothek – Zugriffsleitfaden	Revision:	01	
		Effective Date	12.12.2025	

GI Dental Implants CAD/CAM Bibliotheks-Zugriffsleitfaden

Zugriff auf GI Implantat-Bibliotheken in exocad

GI stellt vollständige CAD/CAM-Bibliotheken für digitale Implantat-Workflows zur Verfügung, einschließlich Implantat-Schnittstellen, Scanbodys, Ti-Basen und prothetischer Komponenten.

Diese Bibliotheken wurden offiziell bei exocad eingereicht und stehen allen lizenzierten Anwendern zur Verfügung.

Dieser Leitfaden erläutert, wie Kunden die GI Bibliotheken direkt in exocad finden und verwenden können.

1. Wo Sie die GI Bibliotheken in exocad finden

Die GI Implantat-Bibliotheken sind bereits im offiziellen exocad-Bibliotheksverzeichnis enthalten.

So greifen Sie darauf zu:

Schritt 1: Öffnen Sie exocad DentalCAD oder exoplan.

Schritt 2: Navigieren Sie zu:

- **DentalCAD:**

Implantatmodul → Implantatsystem auswählen → Herstellerliste → GI

- **exoplan (Implantatplanung):**

Implantatbibliothek → Herstellerliste → GI

Schritt 3: Wählen Sie den benötigten Komponententyp aus:

- Implantatverbindung
- Scanbody
- Ti-Basis
- Schnittstelle für konfektionierte Abutments
- Prothetische Komponenten

Wenn die GI Bibliothek auf Ihrem System noch nicht sichtbar ist, führen Sie bitte ein exocad-Bibliotheksupdate durch und starten Sie die Software neu.

2. Inhalt der GI exocad-Bibliothek

Die folgenden Komponenten stehen für digitale Restaurationen und Implantat-Workflows zur

		page
		1 of 3

	GI Dental Implants CAD/CAM Bibliothek – Zugriffsleitfaden	Revision:	01	
		Effective Date	12.12.2025	

Verfügung:

- Implantat-Interface-Geometrien
- CAD/CAM-Scanadapter (Scanbody)
- Ti-Basis-Geometrien für individuelle Abutments und verschraubte Kronen
- Schnittstellen für konfektionierte Abutments

Diese Dateien entsprechen den offiziellen exocad-Empfehlungen für digitales Scannen, Ausrichtung und prothetisches Design.

3. Für Anwender anderer CAD-Systeme

Einige CAD-Plattformen (z. B. 3Shape, Medit, Dental Wings) synchronisieren ihre Bibliotheken nicht automatisch mit der exocad-Bibliothek.

Wenn Sie ein anderes CAD-System verwenden und die benötigte GI Komponente nicht finden können, kontaktieren Sie uns bitte unter info@general-implants.com und geben Sie folgende Informationen an:

- Implantatplattform / Durchmesser
- Komponententyp (Scanbody, Ti-Basis, Abutment)
- Verwendete CAD-Software

Wir unterstützen Sie bei der Auswahl der richtigen Dateien oder stellen diese bei Bedarf direkt zur Verfügung.

4. Falls eine Komponente in exocad nicht gefunden wird

Wenn eine benötigte GI Komponente in exocad nicht gefunden werden kann, kann dies folgende Ursachen haben:

- Veraltete exocad-Bibliotheksversion
- Falsche Auswahl der Implantatplattform oder des Verbindungstyps
- Nutzung eines Drittanbieter-CAD-Systems
- Fehlende Installation eines Updates

Bitte kontaktieren Sie uns unter Angabe des Komponentennamens oder der Artikelnummer. Unser Team prüft, ob:

		page
		2 of 3

	GI Dental Implants CAD/CAM Bibliothek – Zugriffsleitfaden	Revision:	01	
		Effective Date	12.12.2025	

- die Komponente bereits enthalten ist und lediglich Unterstützung beim Zugriff benötigt wird, oder
- ein Update der exocad-Bibliothek erforderlich ist.

5. We Welcome Your Feedback

Um die bestmögliche digitale Workflow-Erfahrung zu gewährleisten, bitten wir Anwender um Rückmeldung zu folgenden Punkten:

- Welche GI Komponenten sie häufig verwenden
- Welche Artikel schwer auffindbar sind oder fehlen
- Mit welchen CAD-Systemen sie arbeiten

Dies hilft uns, unser CAD/CAM-Bibliotheksangebot zu optimieren und zu entscheiden, ob zusätzliche Downloads auf der Website erforderlich sind.

Support oder Fragen

Bitte kontaktieren Sie uns unter:

info@general-implants.com

GI verpflichtet sich zur Bereitstellung präziser, zuverlässiger und anwenderfreundlicher digitaler Implantat-Bibliotheken für alle CAD/CAM-Umgebungen.

		page
		3 of 3